

MELAseal® 100+

Selladora de bolsas



MELAG
competence in hygiene


MELAseal®100+

Un concepto probado con nueva tecnología

La nueva selladora MELAseal®100+ es la sucesora de la MELAseal®100 sobradamente probada y contrastada en su funcionamiento. Como su anterior modelo, la MELAseal®100+ se diferencia también por su rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso.

Segura, confortable y eficaz

Después de un corto periodo de calentamiento de aproximadamente 2 minutos, podemos sellar sin ningún tipo de pausa. Una nueva electrónica nos indica óptica y visualmente si podemos trabajar con ella después del periodo de calentamiento. La nueva electrónica comprueba el tiempo y la temperatura de sellado, en caso de desviaciones aparece una señal acústica y visual. En el caso de no tener los requisitos necesarios, p.ejem. tiempo de sellado muy corto, aparecerá una señal. El termostato variable permite la utilización de bolsas de diferentes fabricantes a una temperatura diferente. El ancho del sellado de 10 mm cumple sobradamente con la normativa Europea EN 868-5 ya que esta requiere un mínimo de 6 mm, garantizando así una seguridad adicional.

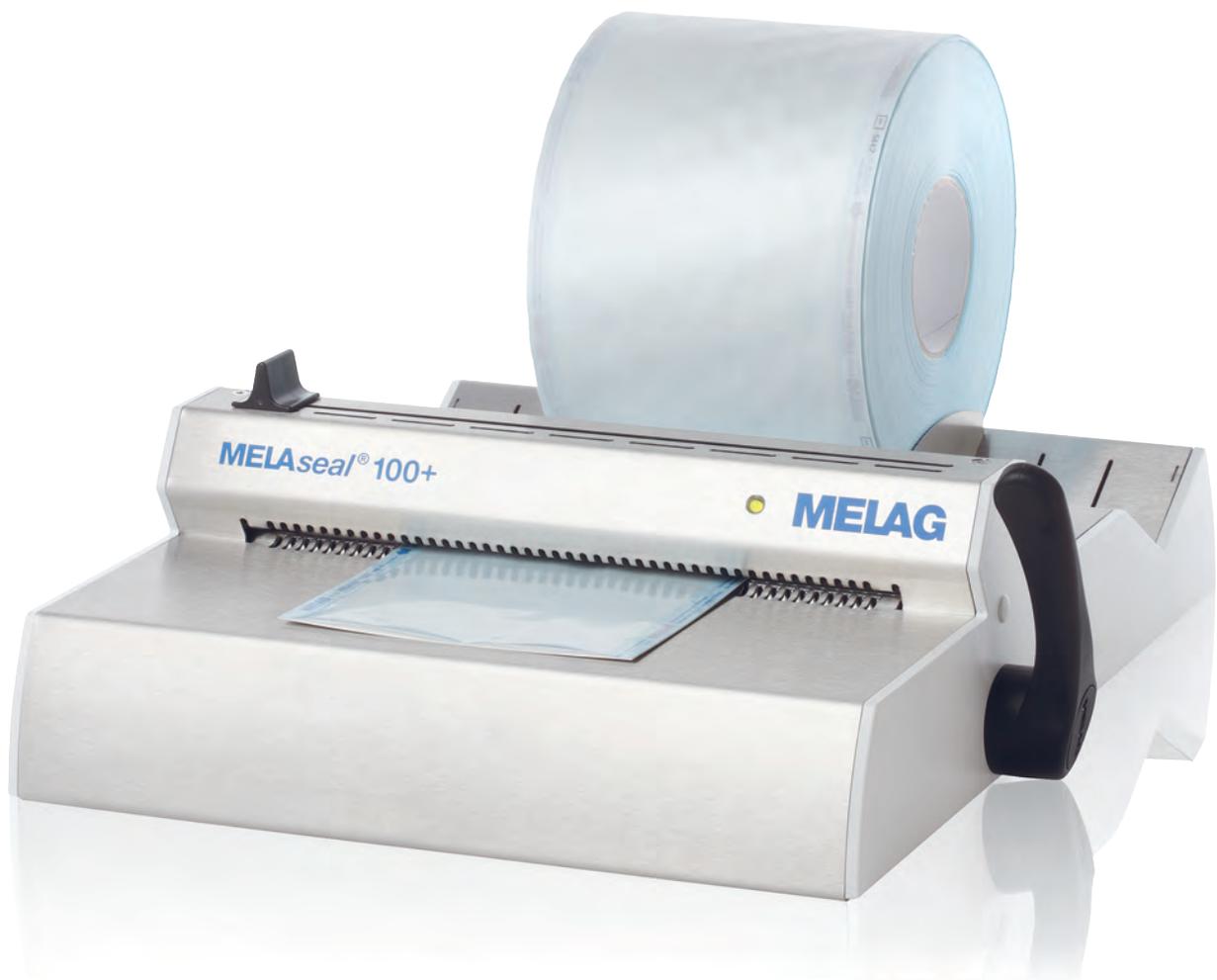

MELAseal® 100+ con soporte de rollos "estándar"

Sellado fácil

Soporte de rollos ergonómicos, permiten sin esfuerzo introducir los rollos de esterilización transparentes (p.E. MELAfol®). Con la cuchilla de corte integrada podemos, durante el proceso de sellado, cortar las bolsas de los rollos a la medida que necesitemos según los instrumentos a utilizar en la clínica.

Tres prácticos soportes de rollos a elegir

Para la selladora de bolsas MELAseal® 100+ se pueden adaptar tres tipos de soporte de rollos:

- El práctico soporte "estándar" (Art.-Nr. 00117) .
- El soporte reducido "confort" (Art.-Nr. 00111).
- El soporte de pared (Art.-Nr. 00106).

MELAseal® está preparada para montar sobre pared.



MELAseal® 100+ con soporte de rollos "confort"

MELAfol® Embalaje de esterilizar transparente

MELAfol® es un embalaje combinado de papel y film. Es impermeable a las bacterias, termosellable, resistente a las arrugas y fáciles de abrir (costura de sellado despegables). MELAfol® lleva incorporado un indicador según EN 868-5, el cual cambia del color azul al marrón una vez efectuada la esterilización. Almacenamiento (p. Ejem.) protegido contra el polvo en un cajón según DIN 58953 Parte 7: hasta 6 Meses.

Rollos à 200m	Nr. Pedido
5cm	00502
7,5cm	00752
10cm	01002
15cm	01502
20cm	02002
25cm	02502

Bolsas (1000 piezas)	Nr. Pedido
5cm x 25cm	00501
7,5cm x 25cm	00751
10cm x 25cm	01001



Bolsa con pliegue (100 piezas)	Nr. Pedido
25cm x 50cm	02051

Control rutinario

El MELAG seal check (Art.-Nr. 01079) se puede utilizar para un control rutinario del sellado (p. Ejem. Semanalmente). Una vez realizado este proceso del sellado, podremos archivar la tira de test con los datos del equipo y el nombre de la persona responsable de su realización. La comprobación periódica del sellado se puede llevar a cabo en MELAG con un equipo de testeo especial donde se comprueba la resistencia del sellado.



Artículos	Nr. Pedido
MELAG seal check	01079


MELAdoc® - Etiquetadora para embalaje de esterilización

Con MELAdoc® se cierra una cadena para documentar después de la preparación y liberación de su instrumental hasta usarlo de nuevo en el paciente. Las etiquetas se pegan sobre el embolsado estéril en ella constan datos como fecha de vencimiento, usuario y número de lote. Una vez utilizado el instrumento podemos utilizar la etiqueta para pegarla de nuevo sobre la ficha del paciente.




Artículos	Nr. Pedido
MELAdoc® Etiquetadora	01095
6 rollos de etiquetas con cinta de color	01097


Medidas y datos técnicos

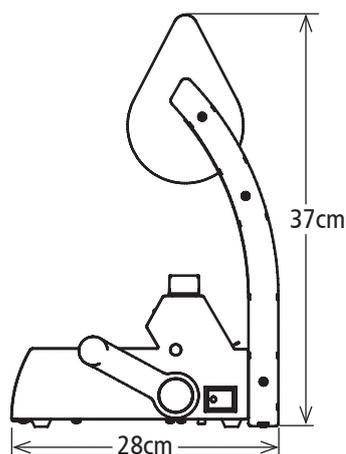

MELAseal® 100+
con Soporte "Confort"

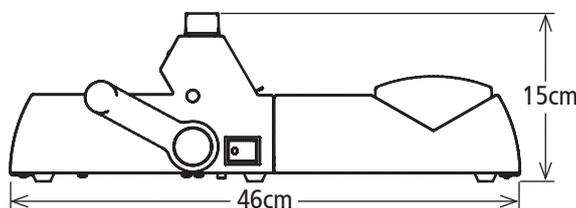

MELAseal® 100+
con Soporte "estándar"

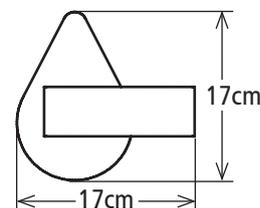

Soporte pared

datos técnicos	MELAseal®100+
Medidas del equipo (incl. mango, A x H x P):	41,5cm x 15cm x 24cm
Conexión eléctrica:	110/230V / 50/60Hz / 300W
Peso:	5,4Kg

Calidad y precisión para una máxima higiene

Desde hace 60 años MELAG comenzó a especializarse en la fabricación de esterilizadores. Por su alta calidad innovadora en combinación con una constante mejora de seguridad, esta empresa familiar se ha convertido en uno de los líderes del mercado internacional. Los más de 450.000 equipos suministrados a nivel mundial son prueba de este éxito en el campo de la higiene, esto nos hace ser líderes del mercado. Toda la gama de nuestros productos están fabricados y desarrollados exclusivamente en Berlín sobre una superficie aproximadamente de 20.000 m². La filosofía de la empresa familiar dirigida en segunda generación consiste en la especialización consecuente en programas de productos limitados. Todo esto es posible en MELAG, con un equipo en I+D de 60 ingenieros altamente cualificados, para seguir desarrollando la gama de productos a un alto nivel internacional.



www.melag.com
MELAG
competence in hygiene